

Tracer *Coxiella burnetii*

Référence : BDE K 298

Matériau de référence interne pour la sérologie de la fièvre Q par ELISA

Usage *in vitro* et strictement vétérinaire



Pathologie concernée

Fièvre Q (ou coxiellose) des bovins, ovins et caprins.

Dénomination

Matériau de référence interne pour la sérologie de la fièvre Q par ELISA.

Référence produit

BDE K 298 - 1 flacon de 0,5 mL

Mode d'obtention

Matériau issu d'un bovin séropositif pour *Coxiella*.

Utilisation prévue

Ce matériau peut être utilisé pour évaluer et vérifier la fidélité des analyses. Il peut par exemple servir de traceur pour l'établissement d'une carte de contrôle.

Se référer au Certificat d'Analyse pour les valeurs cibles.

Mode d'utilisation

Il doit être traité comme un échantillon. Les dilutions sont à effectuer avec la solution de dilution du kit considéré.

Dilution au 1/100 pour le BIO K 298.

Conservation

Au froid positif 5°C ($\pm 3^\circ$ C).

Mesures particulières de biosécurité

Pas de mesure spécifique (cf MSDS).

Élimination

Selon les procédures en vigueur du laboratoire utilisateur.

Historique de révision

| Date | Version | Modifications |
|------------|---------|------------------|
| 29/06/2026 | V01 | Première version |

Note : les modifications mineures concernant la typographie, la grammaire et la mise en forme ne sont pas incluses dans l'historique des révisions.