

Tracer *Mycoplasma bovis*

Référence : BDE K 302

Matériau de référence interne pour la sérologie de *Mycoplasma bovis* par ELISA.

Usage *in vitro* et strictement vétérinaire



Pathologie concernée

Mycoplasmoses des bovins.

Dénomination

Matériau de référence interne pour la sérologie de la mycoplasmoses bovine par ELISA.

Référence produit

BDE K 302 - 1 flacon de 0,5 mL

Mode d'obtention

Matériau issu d'un bovin séropositif pour *Mycoplasma bovis*.

Utilisation prévue

Ce matériau peut être utilisé pour évaluer et vérifier la fidélité des analyses. Il peut par exemple servir de traceur pour l'établissement d'une carte de contrôle.

Se référer au Certificat d'Analyse pour les valeurs cibles.

Mode d'utilisation

Il doit être traité comme un échantillon. Les dilutions sont à effectuer avec la solution de dilution du kit considéré.

Dilution au 1/100 pour le BIO K 302 et le BIO K 260.

Conservation

Au froid positif 5°C ($\pm 3^\circ\text{C}$).

Mesures particulières de biosécurité

Pas de mesure spécifique (cf MSDS).

Élimination

Selon les procédures en vigueur du laboratoire utilisateur.

Historique de révision

Date	Version	Modifications
02/07/2026	V01	Première version

Note : les modifications mineures concernant la typographie, la grammaire et la mise en forme ne sont pas incluses dans l'historique des révisions.